



TEST DE GRAHAM Safe & Clean ^(P)

Portas preparados para detección de *Enterobius vermicularis*


Nuevo sistema

Límpio y Seguro

Simplifica la toma de muestra

Evita el contacto directo con el vidrio

Protege de posibles contagios

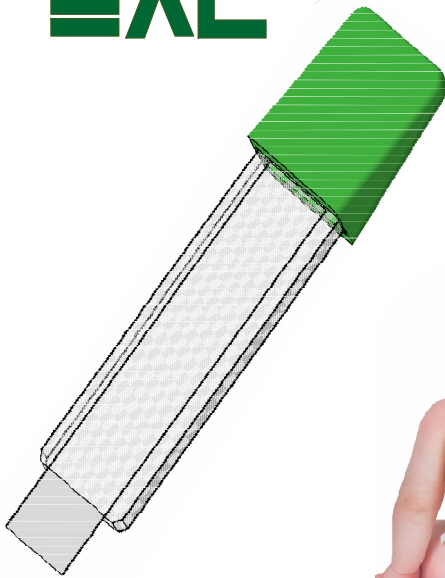

Enterobius vermicularis es un pequeño nematodo parásito del hombre conocido popularmente como oxiuro que causa la enfermedad intestinal conocida como oxiuriasis o enterobiasis.


El diagnóstico en el laboratorio de la presencia de oxiuros se efectúa por la recuperación de los huevos de la zona perianal mediante el uso del Test de Graham y su posterior identificación microscópica. Las muestras deberán recogerse durante 3 días consecutivos para que sean representativas.



¿En qué consiste el Test de Graham Safe & Clean?

Es un sistema compuesto por tres portaobjetos de vidrio con cinta adhesiva, listos para uso, incluidos en una caja de plástico que los protege durante el transporte.


Incluye además un dispositivo (capuchón) de material plástico, flexible y suave, que se acopla a uno de los extremos del portaobjetos para facilitar la toma de la muestra.

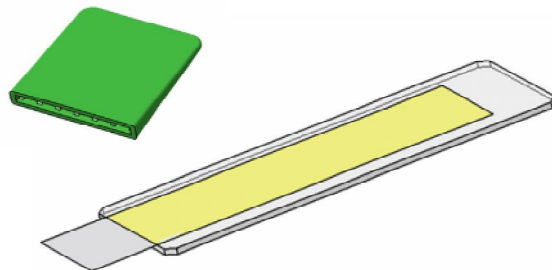

¿Qué ventajas ofrece el uso del Test de Graham Safe & Clean?

- Evita el contacto directo con la zona perianal, eliminando la posibilidad de contagio durante la toma de la muestra.
- Impide el contacto del paciente con el porta de vidrio previniendo cortes o accidentes.
- La caja de plástico evita la rotura de los mismos durante el transporte.

Protocolo de toma de muestra:

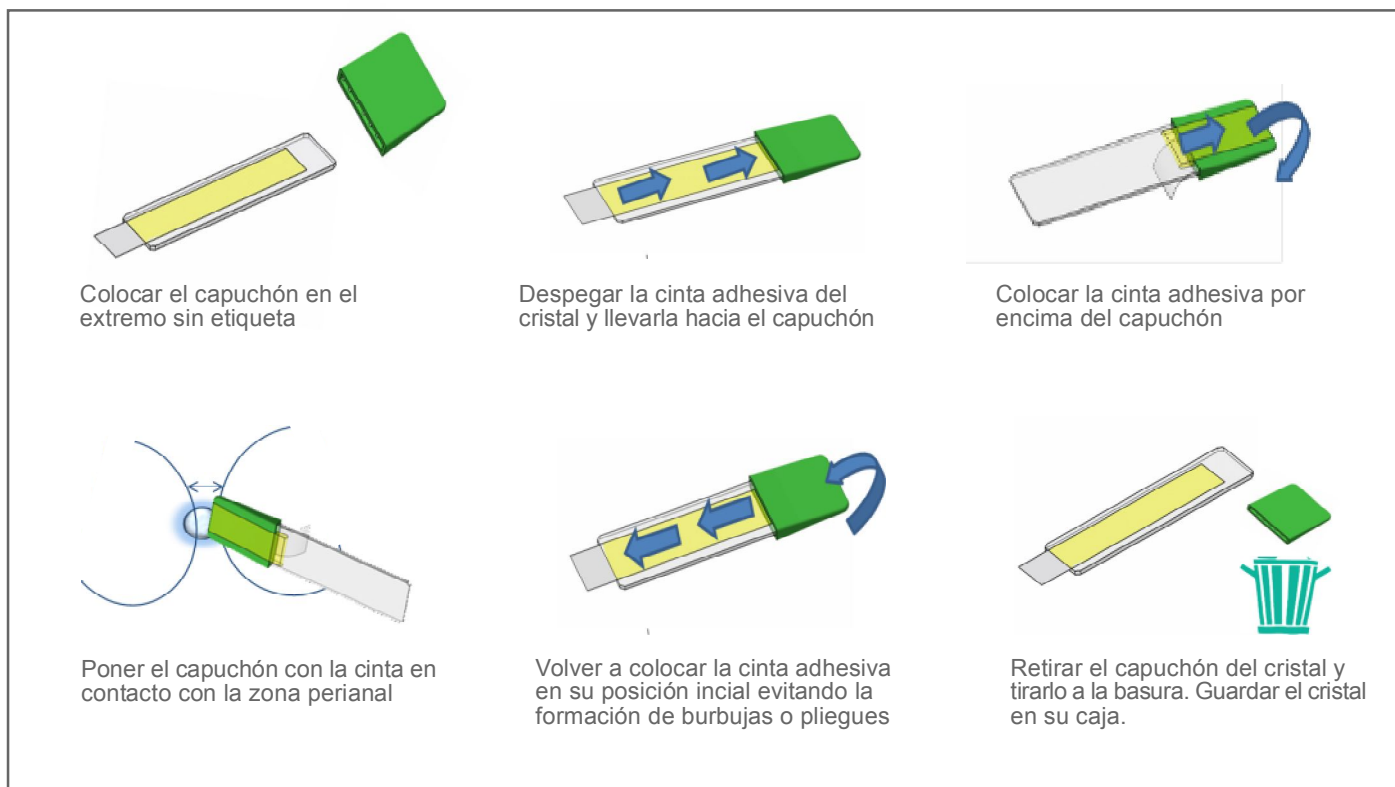


The diagram illustrates the following steps:

- Colocar el capuchón en el extremo sin etiqueta**: Placing the green cap on the end of the test strip without the label.
- Despegar la cinta adhesiva del cristal y llevarla hacia el capuchón**: Peeling the adhesive strip from the glass and moving it towards the cap.
- Colocar la cinta adhesiva por encima del capuchón**: Placing the adhesive strip over the cap.
- Poner el capuchón con la cinta en contacto con la zona perianal**: Pressing the cap with the adhesive strip against the perianal area.
- Volver a colocar la cinta adhesiva en su posición inicial evitando la formación de burbujas o pliegues**: Returning the adhesive strip to its original position to avoid bubbles or folds.
- Retirar el capuchón del cristal y tirarlo a la basura. Guardar el cristal en su caja.**: Removing the cap from the glass and disposing of it in the trash. Keeping the glass in its box.

Referencias disponibles:

Referencia	Descripción
RP1713	REAL Test de Graham 90 Tests (90 sobres con 3 portas)
RP1713C	REAL Test de Graham 90 Tests (90 cajas rígidas de plástico con 3 portas)
RPTGSF	REAL Test de Graham Safe & Clean 90 Tests (90 cajas rígidas de plástico con 3 portas más Safe & Clean)

 Patente en trámite