

Portaobjetos listos para usar para la detección de *Enterobius vermicularis*



- Limpio y seguro
- Simplifica la toma de muestra
- Evita el contacto directo con el vidrio
- Reduce la posibilidad de contagio
- Marcado CE IVD



¿En qué consiste el Test de Graham Safe & Clean?

El REAL Test de Graham Safe & Clean es la mejor solución para la detección de *Enterobius vermicularis*, está constituido por un portaobjetos con cinta adhesiva listo para usar que permite una recogida fácil y eficiente. Fabricado con el vidrio de la máxima calidad para garantizar una visualización óptima.

Esta versión del dispositivo incluye, además, nuestro revolucionario capuchón de plástico flexible que facilita la recolección, a la vez que evita el contacto directo entre la piel del paciente y el vidrio, previniendo cortes y arañazos, así como también disminuye la probabilidad de infección accidental durante la recogida de la muestra.




¿Qué ventajas ofrece nuestro Test de Graham Safe & Clean?

Evita el contacto directo con la zona perianal, reduciendo al máximo la posibilidad de contagio durante la toma de muestra. Impide el contacto del paciente con el portaobjetos de vidrio previniendo cortes o accidentes.


Caja de plástico resistente que evita la rotura de los mismos durante el transporte.

Características técnicas


- Incorpora una pestaña para la fácil manipulación del adhesivo
- Superficie de visualización completa (sin zonas mate)
- Dimensiones: 76 x 26 x 1 mm
- Esquinas esmeriladas a 45 °
- Posibilidad de personalización

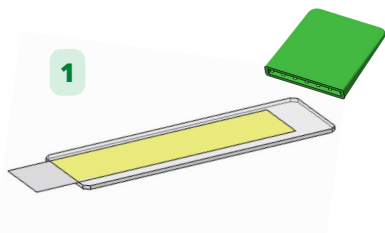


1 Coloque el capuchón en el extremo sin etiqueta.

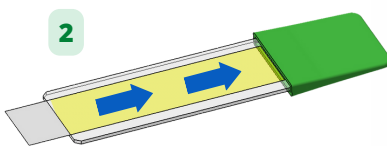


2 Despegue la cinta adhesiva en dirección al capuchón.

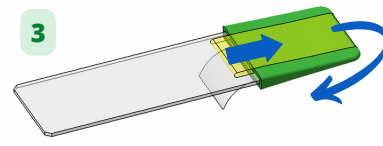


3 Coloque la cinta por encima del capuchón.

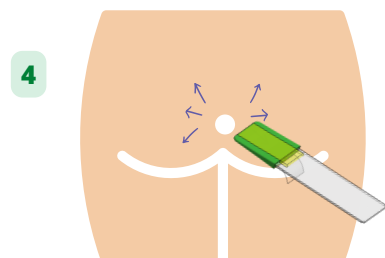

4 Presione el capuchón alrededor de la zona perianal por la parte adhesiva.

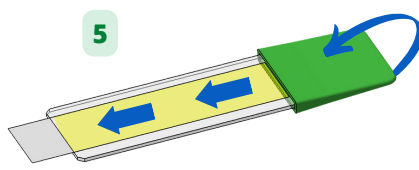

5 Coloque la cinta adhesiva en su posición inicial, evitando la formación de burbujas.

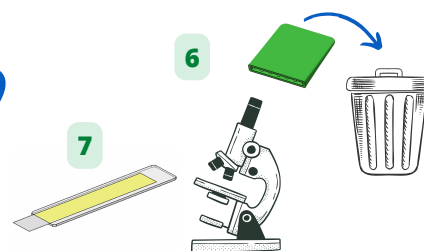

6 Retire el capuchón y deséchelo. Entregue el portaobjetos al laboratorio en su caja.

⚠ Para evitar contagios manipular cuidadosamente y lavarse las manos exhaustivamente tras la recogida

Referencia	Descripción	Presentación
RP1713	Test de Graham	(90 sobres de papel con 3 portaobjetos, sin capuchón)
RPTGSF	Test de Graham Safe & Clean	(60 cajas rígidas de plástico con 3 portaobjetos, incluye capuchón*)
RPTGSF1	Test de Graham Safe & Clean	(50 cajas rígidas de plástico con 1 portaobjetos, incluye capuchón*)

*Se incluyen tantos capuchones como portaobjetos



Visita nuestra web para descubrir todos los productos



Durviz S.L.
 Parque Tecnológico de Valencia
 Leonardo da Vinci, 10
 46980 Paterna (Valencia)
 España

Tel: 96 136 61 07
 Fax: 96 136 61 68
 durviz@durviz.com
www.reallaboratory.com
www.durviz.com

230419

